

パルスオキシメータ
JPD-500D

取扱説明書



管理医療機器／特定保守管理医療機器
認証番号：228AFBZX00001000

- * 在宅において使用する場合は医師の指示に基づいてご使用ください。
- * 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- * ご使用前に安全上の注意を必ずお読みください。
- * この取扱説明書は大切に保管してください。

販売元 株式会社ちやいなび

本取扱説明書の著作権は 株式会社ちやいなび に属します。
本取扱説明書は 株式会社ちやいなび の書面による同意なしにいかなる形態でも複製・配布・変更することはできません。
本取扱説明書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
※ "JUMPER"は Shenzhen Jumper Medical Equipment co., Ltd. の登録商標です。

保証書
本書は下記記載の内容により無償で修理を行うことを約束するものです。

1. 保証期間
取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、購入後 6 ヶ月まで無償で修理を行ふことを約束します。
2. 保証を適用しない範囲
保証期間内でも次の場合は有償になります。
 ①誤用及び誤扱い不注意による障害。
 ②火災・地震・雷・風水害等の天災地変、及び異常電圧による故障及び損傷。
 ③裏勤・テロ活動・政治による暴動領事活動・内戦国内紛争・戦争、その他不可抗力により発生した故障・不適合。
 ④当社が指定した機器以外の機器との接続に起因する故障。
 ⑤不当な修理や改造に起因する故障。
 ⑥本体の表示が誤る場合。
 ⑦本体でお買い上げ年月日、販売店名の記載、ご署名がない場合。
3. 保証の対象としない範囲
保証期間内でも次の場合は有償になります。
 ①使用中または保管中に生じた外観上の変化。
 ②消耗品及び付属品の損耗／消耗または劣化。
4. 保証の受け方
修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて販売店にお申しつけ下さい。
5. 修理を行う業者
製造元である Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. (中国)
6. 保証の適用
この保証書は日本国内で使用される製品のみに適用します。
This warranty is valid only in Japan.
付属品は初期不具合以外保証外となりますのでご了承ください。
本証は再発行しませんので大切に保管してください。
この保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間を過ぎた後の有償修理につきましては、販売店にお問い合わせください。

株式会社ちやいなび
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進ビルディング10F
TEL 044-276-8741 FAX 044-276-8742

品名または型番	パルスオキシメータ JPD-500D		
製造番号			
お買い上げ年月日	年	月	日
お買入店名	保証期間	6ヶ月	
お客様	ご住所	〒	
	お名前	(ふりがな)	様
	T E L		
販売店	住所・販売店名・電話番号		

この保証書は、上記製品を上記保証期間及び条件に従い、無償修理することを約束するものです。
従って、保証適用外の場合の修理は有償とさせて頂きますので予めご了承ください。

[保証に関する問い合わせ先]
※保証に関するお問い合わせは、商品をお買い上げいただいた販売店にお問い合わせください。

1. 安全上の警告及び注意

本品を使用するときは必ず以下の注意事項をよく守り、正しくお使いください。



患者やユーザの死亡、傷害、有害事象など重大な結果をもたらす可能性を警告します。

- ⚠ 爆発の危険性があります。本品は、空気、酸素または亜酸化窒素等の、可燃性麻酔剤の混在している場所では使用しないこと。
- ⚠ パネルが破損すると有毒な化学物質が漏出します。本品の表示パネルが破損している場合は取り扱いに注意すること。
- ⚠ 本品を改造しないこと。火災や感電の原因になります。
- ⚠ 高照度の周辺光下では、センサの部位を光を通さない素材で覆わないと測定値が不正確になることがあります。
- ⚠ 正確な動作を確保し、装置の故障を防止するため、雨にさらすなど極端に湿度の高い状態に置かないこと。装置の精度が低下、または故障の原因となることがあります。
- ⚠ 破損した本品は使用しないでください。
- ⚠ 電池は火の中に入れたり、充電、ショート、加熱、分解などをしないでください。破裂や発熱により火災、ケガの原因になります。
- ⚠ 万が一、本品が破損したり、発煙、異臭がするなど異常があった場合は直ちに使用を中止してください。火災の原因になります。



本品の使用に際して、禁止される行為を示します。

- 🚫 幼児やお子様だけで使用させないでください。
[ケガをする可能性があります。]
- 🚫 本品の材質に対し過敏症のある患者に使用しないでください。
<患者に接触する構成品の材質>
本体：ABS樹脂、指挿入部：シリコンゴム
- 🚫 MRI検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないでください。[MRI装置への吸着や、火傷などのおそれがあるため。]
- 🚫 高圧酸素患者治療装置に本品を持ち込まないでください。[誤作動や破損、爆発のおそれがあるため。]
- 🚫 本製品を長時間装着したまま放置しないでください。
[装着部位の皮膚の炎症や、圧迫壊死の可能性があります。]
- 🚫 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。




本製品を安全かつ効果的に使用するために必要な配慮を行うための注意を促します。


- ⚠ 新生児や乳児に使用しないでください。
- ⚠ アルカリ電池以外使用しないでください。
また、電池を装着の際に必ず電極 土 を間違わないように正しく入れてください。
- ⚠ 本品を長時間装着したまま使用しないでください。
接触部位に低温やけどの発赤、かぶれなどが起きる場合があります。痛みやかゆみなど異常を感じた場合は、使用を中止し担当の医師にご相談ください。

2. 各部の名称


正面

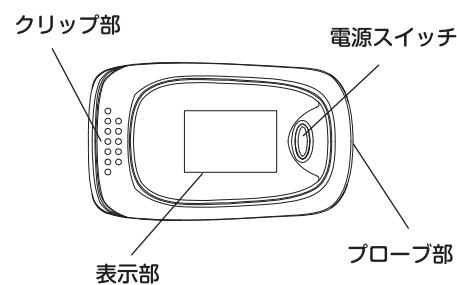

裏面

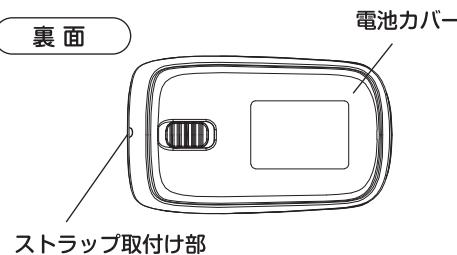

表示部

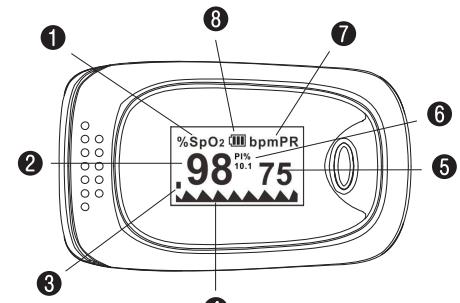

●画面表示方向

電源が入っている状態で電源ボタンを押すと、表示モードや画面表示方向が順次切り替わります。



① 酸素飽和度表示マーク

② 酸素飽和度

③ 脈波レベルメータ

④ 脈波形表示

⑤ 脈拍数表示マーク

⑥ 脈拍数


⑦ 灌流指標 (PI)

⑧ 電池残量表示


3. 使用方法

1. 電池の入れ方


- ⚠ 使用前に本体に損傷がないことを確認してください。
損傷がある場合は使用しないでください。

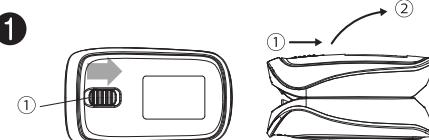

電池カバーを外します。本体裏側の電池カバーのクリップ部分をスライドしながら開けてください。

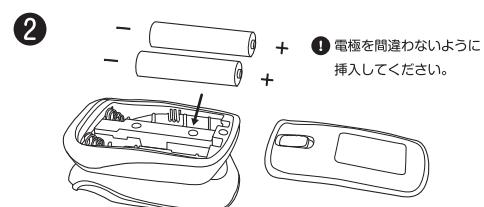

アルカリ単四形電池を装着します。アルカリ単四形電池 2 本を挿入してください。

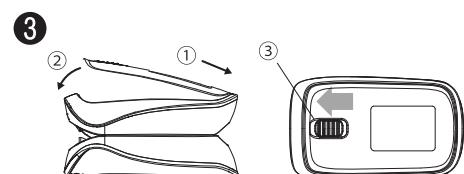


電池カバーを①と逆の要領で閉じてください。


① 涼しく、乾燥した環境で乾電池を保管してください。

② 乾電池を正しく装着しないと、健康や環境への危険を招く恐れがあります。


2. 測定

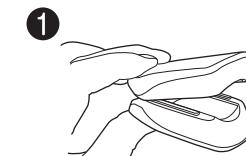


本体のクリップ部をつまみ、プローブ部を開く。

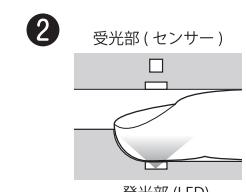


指の爪面を上にして、指先がガイドに触れるまで挿入し、クリップを放す。

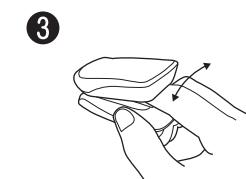

指を軽く曲げて、指先がプローブ部の中心に水平に挿入され、先端がガイドに触れていることを確認する。

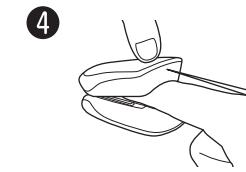

電源スイッチを押すと、測定が開始されます。
電源が入っている状態で電源ボタンを押すと、表示モードや画面表示方向が順次切り替わります。
「2. 各部の名称 (表示部 - 画面表示方向)」を参照。

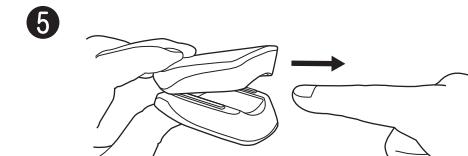

測定を終了するときは、本体から指をぬきます。

● 約 10 秒で自動的に電源が切れます。

